

Menstrual Cup Sanitizer

月経カップ専用 洗浄カップ

■仕様

品名 月経カップ専用 洗浄カップ

品番 081120S-00


サイズ 直径 90mm、高さ 78mm（折りたたみ時 30mm）

容量 270ml

素材 本体：食品グレードシリコーン（耐熱温度 200℃）

ふたとホルダーリング：ポリプロピレン（耐熱温度 140℃）

電子レンジ対応、食洗機対応 Made in China

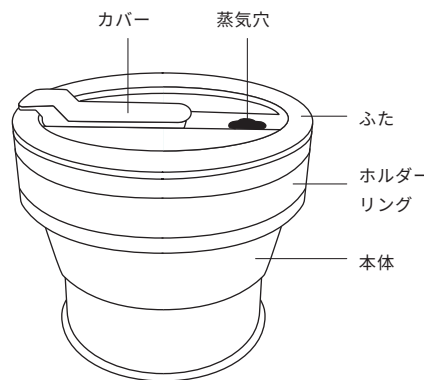

安全上の注意

■注意

※加熱後は高温になるため、やけどに十分に注意してください。
※誤った使用は、本体の破損や発火につながる恐れがあります。

■使用上の注意

- 本品は月経カップの洗浄以外の目的で使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- シリコーン特有のにおいを感じる場合がありますが、衛生上の問題はありません。徐々に薄れていきますが、気になる場合は煮沸してからご使用ください。


■電子レンジ使用上の注意

- 本体の劣化、破損、発火などの恐れがあるので、以下にご注意ください。
 - ・水の量が少ない状態や空の状態では加熱しないでください。
 - ・家庭用電子レンジを使用してください。
 - ・オープン、トースター、グリル、オート機能などで使用しないでください。
 - ・耐熱温度以上にならないように、ワット数と加熱時間に注意してください。
 - ・本体や月経カップに油分が付着した状態で加熱すると、耐熱温度以上になる可能性があるため、油分を洗い流してから使用してください。
- 水の量が多すぎると熱湯があふれることがあります。
- 必ずふたの蒸気穴を開けた状態で加熱してください。
- 本体がやわらかいため、ホルダーリングをつけてご使用ください。
- 加熱後は高温になっているため、ミトンやふきん等を使い、やけどに注意してください。
- 加熱しすぎないでください。急激に沸騰が起こり中身が飛び散ることがあります。加熱しすぎた場合は、すぐに扉を開けずに数分間冷ましてから取り出してください。

■お手入れ方法

- ・ふたとホルダーリングを取り外して洗ってください。ふたのカバーは取り外せません。
- ・本体が傷つくため、スチールたわしや磨き粉などを使用しないでください。
- ・洗浄後は完全に乾燥させてから保管してください。

■ふたの開け方

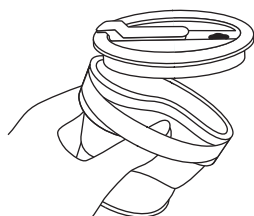


- ①カバーをずらして蒸気穴を開ける。
- ②本体の底を引き出しコップ状にする。
- ③ホルダーリングの下を親指でへこませるとふたが外れる。

使い方

■使い方1：電子レンジで月経カップを消毒する




①洗浄カップに月経カップを入れ一番上のラインまで水を入れる。

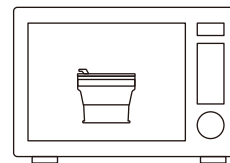

②蒸気穴を開けた状態でふたをして、電子レンジで温める。（目安：500W 5分間、600W 3分間）




③温めた直後は洗浄カップが高温になるため、時間をおいて冷めてから取り出す。または、ミトンやふきん等を使って取り出して、蒸気穴からお湯を捨てる。

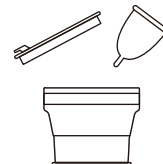


④本体を水で冷やしてからふたを開けて、月経カップを取り出す。
※やけどに注意してください。

■使い方2：洗面所がないときに月経カップを洗浄する

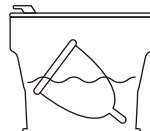

①洗浄カップに月経カップと水（水道水または飲料水）を半分くらいまで入れ、しっかりとふたをする。

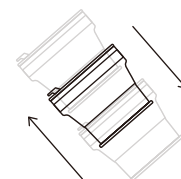

②指でカバーを押さえながら月経カップがきれいになるまでシャカシャカ振る。